

# PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE

## INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO DEL

# LIFEPAK 15



# PANORAMICA FRONTALE



# ACCENSIONE



● ACCESO

**SI PREME IL PULSANTE  
“ACCESO” PER  
QUALCHE SECONDO,  
FINO A QUANDO LA  
SPIA ACCANTO  
DIVENTA DI COLORE  
VERDE**

# PROVA UTENTE

**LA PROVA UTENTE E' DA EFFETTUARE  
OGNI VOLTA CHE SI PRENDE SERVIZIO,  
PER VERIFICARE IL CORRETTO  
FUNZIONAMENTO DEL LIFEPAK.**

**NELLE SLIDE SUCCESSIVE E'  
EVIDENZIATO IL PROCEDIMENTO**



**OPZIONI**

**UNA VOLTA PREMUTO VERRA' VISUALIZZATO IL SEGUENTE MENU' A VIDEO**

**SI SELEZIONA CON LA ROTELLINA LA VOCE "PROVA UTENTE" E SI CONFERMA LA SCELTA PREMENDO LA ROTELLINA**



<b>Opzioni</b>	
<b>Paziente...</b>	<b>Archivi...</b>
<b>Stimolazione...</b>	<b>Stampa...</b>
<b>Data/Ora...</b>	<b>Prova utente</b>
<b>Volume allarme...</b>	

# **DATI DEL PAZIENTE**

**IL LIFEPAK PERMETTE IL SALVATAGGIO DEI  
DATI DEL PAZIENTE, UTILI PER IL  
RICONSCIMENTO DEL TRACCIATO  
STAMPATO DA ALLEGARE ALLA CARTELLA  
CLINICA E PER LA RICERCA NELLO STORICO  
DEGLI EVENTI.**

**NELLE SUCCESSIVE SLIDE VERRA'  
EVIDENZIATO IL PROCEDIMENTO**



**OPZIONI**

**UNA VOLTA PREMUTO VERRA' VISUALIZZATO IL SEGUENTE MENU' A VIDEO**

**SI SELEZIONA CON LA ROTELLINA LA VOCE "PAZIENTE" E SI CONFERMA LA SCELTA PREMENDO LA ROTELLINA**




<b>Opzioni</b>	
<b>Paziente...</b>	<b>Archivi...</b>
<b>Stimolazione...</b>	<b>Stampa...</b>
<b>Data/Ora...</b>	<b>Prova utente</b>
<b>Volume allarme...</b>	

## Opzioni/Paziente

Cognome...	▶
Nome...	
ID paziente...	
Incidente...	
Età	
Sesso	

SI SELEZIONA CON LA ROTELLINA  
LA VOCE CHE SI VUOLE INSERIRE SI  
CONFERMA LA SCELTA PREMENDO  
LA ROTELLINA

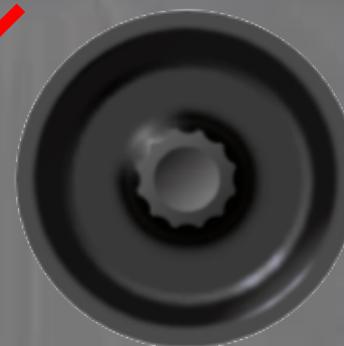

## Opzioni / Paziente / Cognome

Cognome: **A** \_ \_ \_ \_ \_

**A** B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fine

Fine

Spazio

Spazio

Backspace

Azzera

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

SI SELEZIONA CON LA ROTELLINA  
LA LETTERA DA INSERIRE E SI  
CONFERMA PREMENDO LA STESSA.  
UNA VOLTA TERMINATO  
L'INSERIMENTO SI SELEZIONA  
"FINE " E SI PRIME LA ROTELLINA

# PANORAMICA SCHERMO


FREQUENZA CARDIACA

STATO BATTERIA

SATURAZIONE

CANALI  
DERIVAZIONI

PRESSIONE

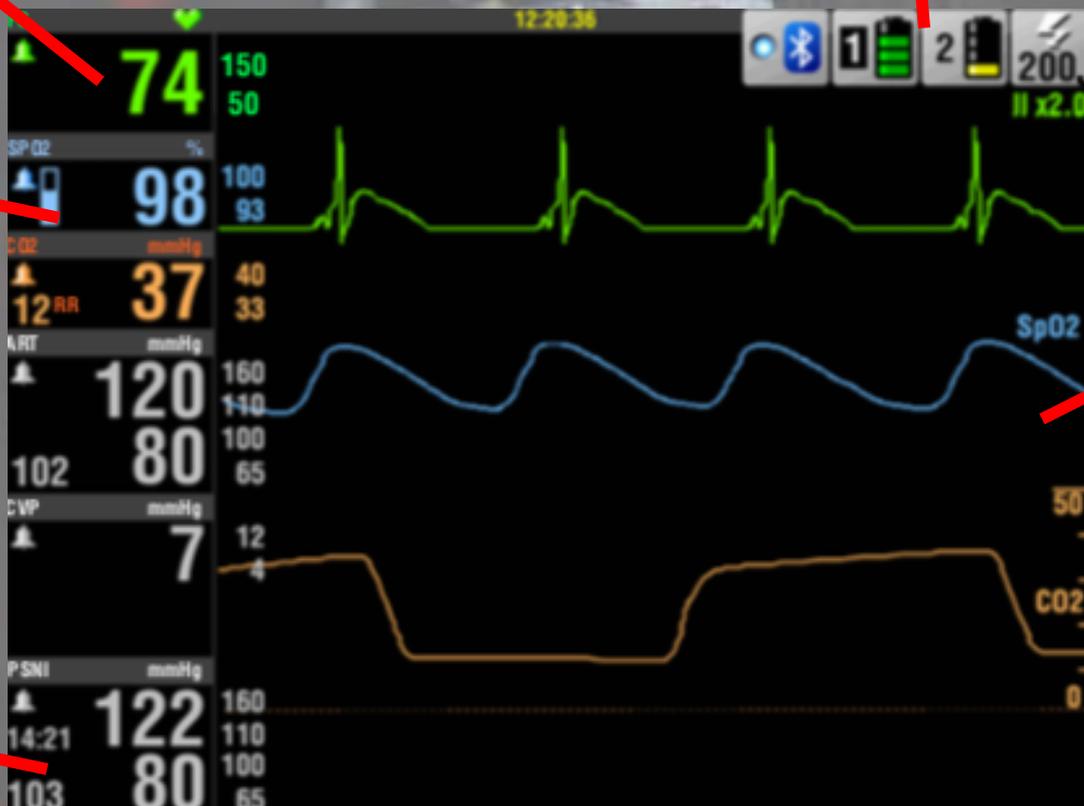


# SELEZIONE DERIVAZIONI

DER.

UNA VOLTA PREMUTO VERRA' VISUALIZZATO IL SEGUENTE MENU' A VIDEO

SI SELEZIONA CON LA ROTELLINA LA DERIVAZIONE INTERESSATA E SI CONFERMA LA SCELTA PREMENDO LA ROTELLINA

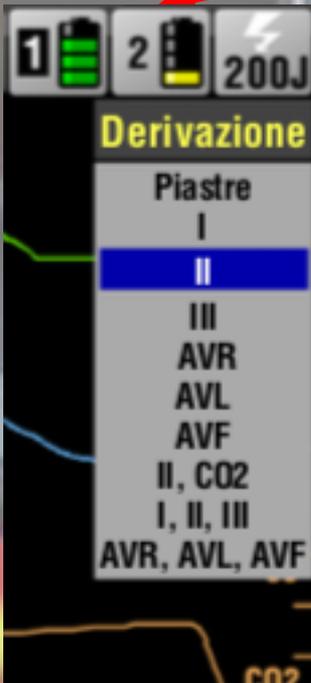

# STAMPA DEL TRACCIATO



UNA VOLTA COLLEGATI GLI  
ELETTRODI AL PAZIENTE E DOPO  
CHE LO STRUMENTO HA  
ACQUISITO IL TRACCIATO,  
PREMERE IL PULSANTE  
“STAMPA” PER INIZIARE LA  
STAMPA DEL TRACCIATO.  
PREMERE DI NUOVO PER  
TERMINARLA

STAMPA

# **PRESSIONE**

**IL LIFEPAK 15 HA IN DOTAZIONE UN BRACCIALE PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE.**

**NELLE SLIDE SUCCESSIVE VERRA' MOSTRATO IL FUNZIONAMENTO**

**APPLICARE IL BRACCIALE COME IN FIGURA**



**UNA VOLTA POSIZIONATO IL  
BRACCIALE AL PAZIENTE  
PREMERE IL PULSANTE “PSNI”.**

**AL TERMINE DELL’OPERAZIONE  
LA PRESSIONE SARA’  
VISUALIZZATA NELLA PARTE  
DELLO SCHERMO DEDICATA**



# ARCHIVIO DATI

**IL LIFEPAK 15 HA UNA FUNZIONE PER  
L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI RACCOLTI IN CIASCUN  
INTERVENTO.**

**NELLE SLIDE SUCCESSIVE VERRA' MOSTRATO IL  
METODO PER RIVEDERE QUESTI DATI**



**OPZIONI**

**UNA VOLTA PREMUTO VERRA' VISUALIZZATO IL SEGUENTE MENU' A VIDEO**

### Opzioni

Paziente...	Archivi...
Stimolazione...	Stampa...
Data/Ora...	Prova utente
Volume allarme...	

**SI SELEZIONA CON LA ROTELLINA LA VOCE "ARCHIVI" E SI CONFERMA LA SCELTA PREMENDO LA ROTELLINA**



## Opzioni / Archivi

Accedere agli archivi del paziente?  
Termine monitoraggio e chiusura della  
cartella del paziente

Sì

No

Premere Selezione veloce per confermare

SELEZIONARE "SÌ". A QUESTO PUNTO SI  
APRIRA' UNA SCHEDA COSÌ

## Opzioni / Archivi

Invia dati...

Modifica...

Stampa...

Elimina...

SELEZIONARE "STAMPA"

Spegn. aliment. per uscire dalla mod. arch.

Opzioni / Archivi / Stampa

<b>Stampa</b>	
Paziente	LEE, WILLIAM
Rapporto	SOMMARIO EVENTI
Formato	3 canali
Annulla	

**SI APRIRA' LA SEGUENTE SCHEDA,  
RELATIVA AI DATI DELL'ULTIMO PAZIENTE  
REGISTRATO. SE I DATI SONO CORRETTI  
CONFERMARE "STAMPA" ALTRIMENTI  
SELEZIONARE "PAZIENTE"**

**PER CAMBIARE PAZIENTE SELEZIONARE  
LA VOCE "PAZIENTE" DA QUESTA  
SCHERMATA. VERRANNO POI  
VISUALIZZATI TUTTI I PAZIENTI INSERITI.  
SELEZIONARE QUELLO DESIDERATO E  
CONFERMARE CON LA ROTELLINA**

Opzioni / Archivi / Modifica


<b>Paziente</b>	▶ 031006122424
Cognome	LEE
Nome	WILLIAM
ID paziente	528760004
Incidente	BF412
Età	56
Sesso	Maschio

# CAVO MULTIFUNZIONE

**IL LIFEPAK 15 PUO' ANCHE ESSERE UTILIZZATO COME  
DAE SEMIAUTOMATICO**


**NELLE SLIDE SUCCESSIVE VERRA' MOSTRATO IL  
METODO PER UTILIZZARLO**

# INSERIRE O TOGLIERE IL CAVO DAL LIFEPAK

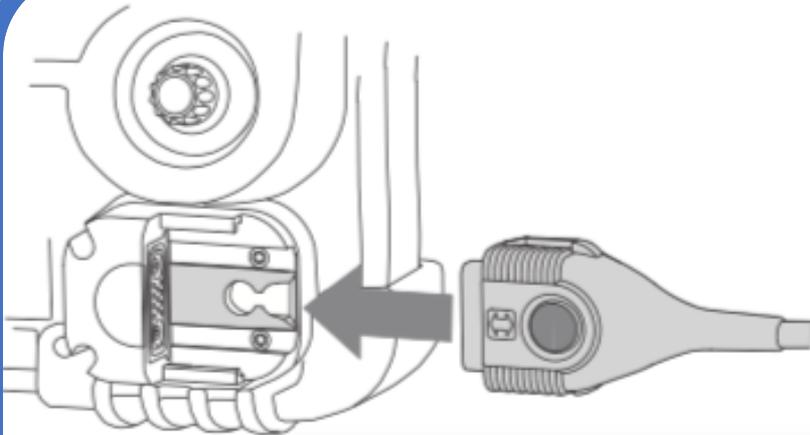

1. Allineare il connettore del cavo terapia con la presa.
2. Far scorrere il cavo terapia fino a bloccare il connettore in posizione. Si sente uno scatto.


Per scollegare il cavo terapia dal defibrillatore:

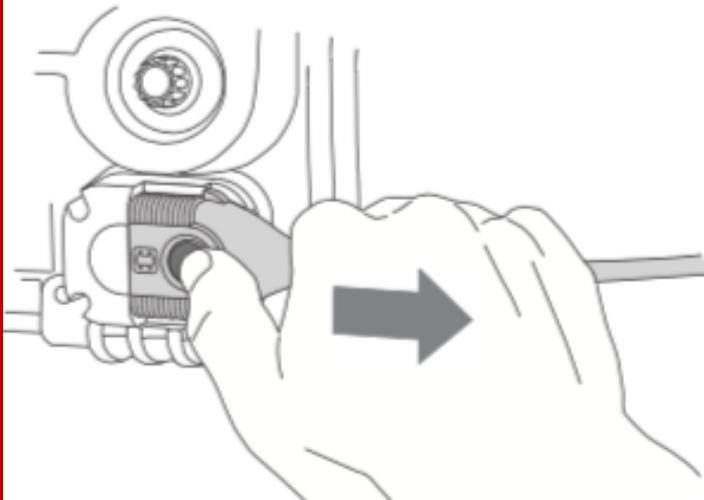

1. Premere il pulsante di rilascio sul connettore del cavo terapia.
2. Estrarre il connettore del cavo terapia.

# ECG A 6 E 12 DERIVAZIONI

GRUPPO DERIVAZIONI  
PERIFERICHE

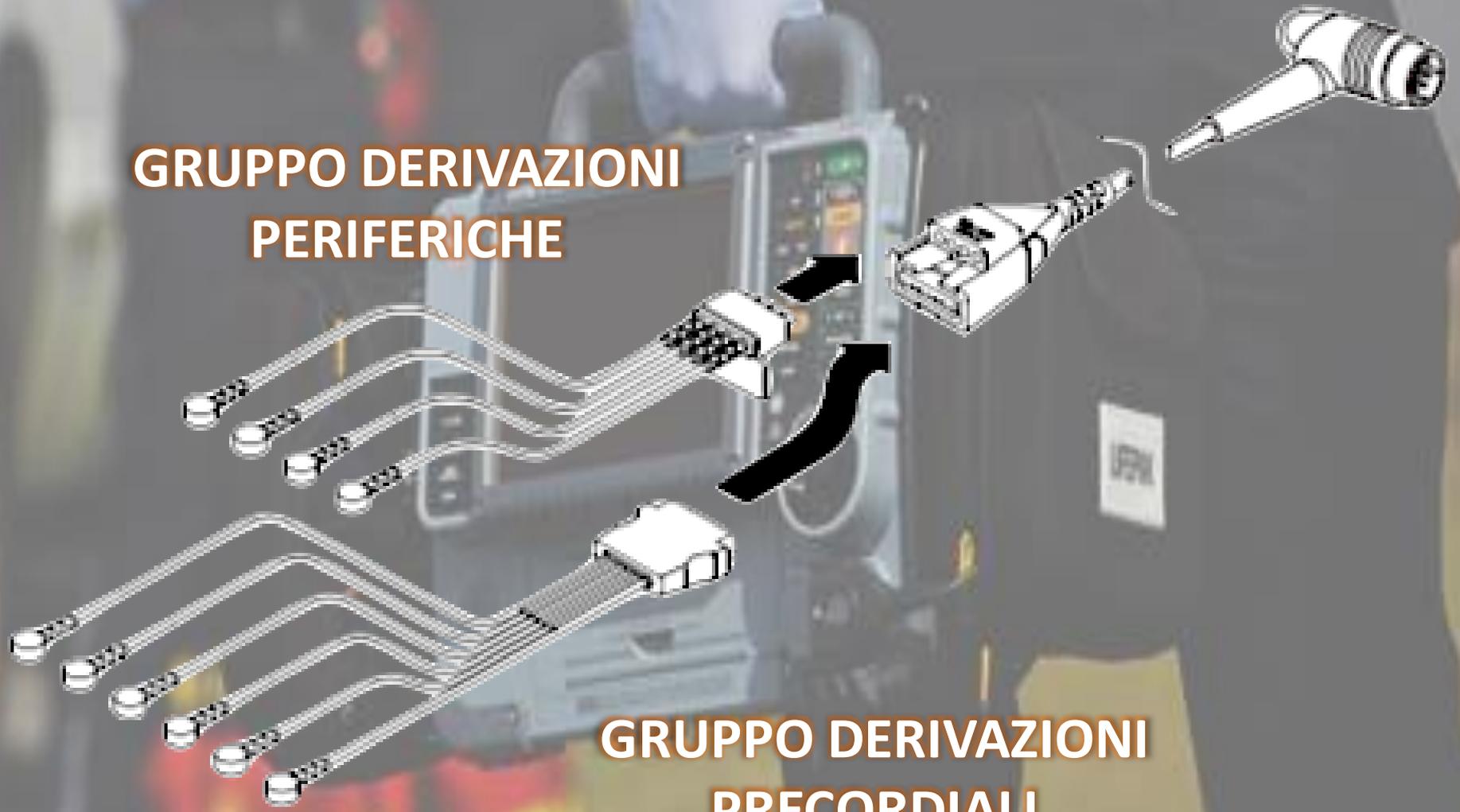

GRUPPO DERIVAZIONI  
PRECORDIALI

# 6 DERIVAZIONI

PER QUESTO TIPO DI  
ECG OCCORRE  
SOLAMENTE IL CAVO  
DELLE DERIVAZIONI  
PERIFERICHE

ROSSO

GIALLO



NERO

VERDE




# 12 DERIVAZIONI

PER QUESTO TIPO DI  
ECG OCCORRE IL CAVO  
DELLE DERIVAZIONI  
PERIFERICHE E QUELLO  
DELLE DERIVAZIONI  
PRECORDIALI

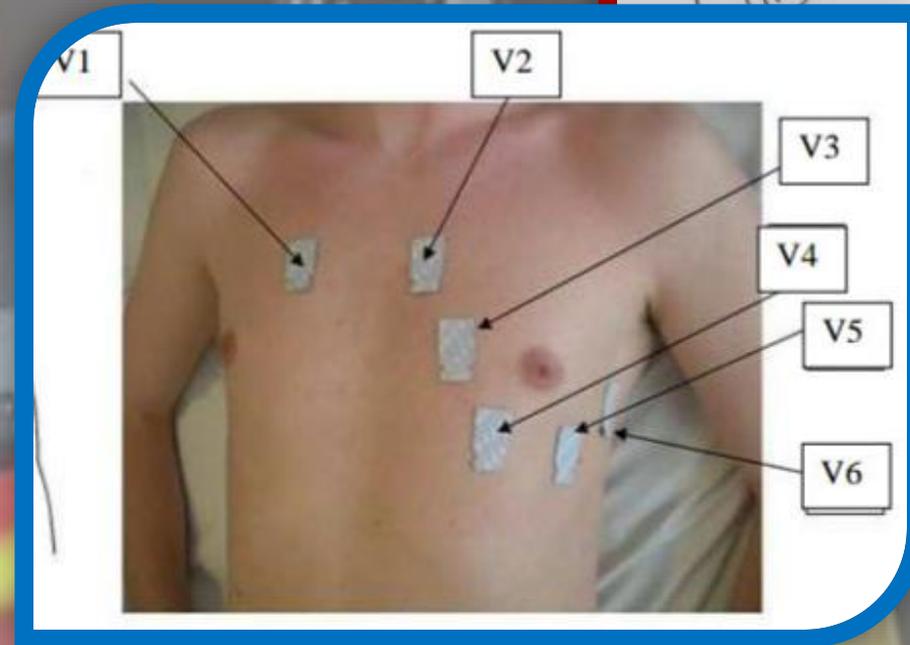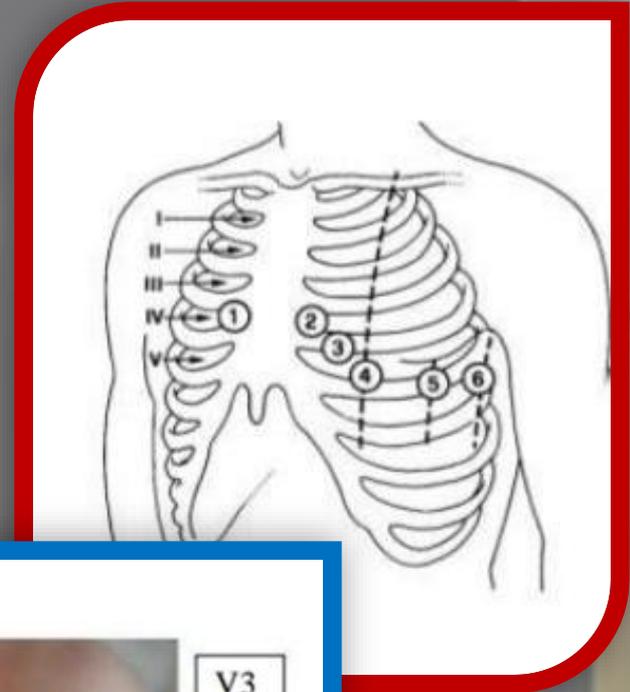

# ECG STAMPATO

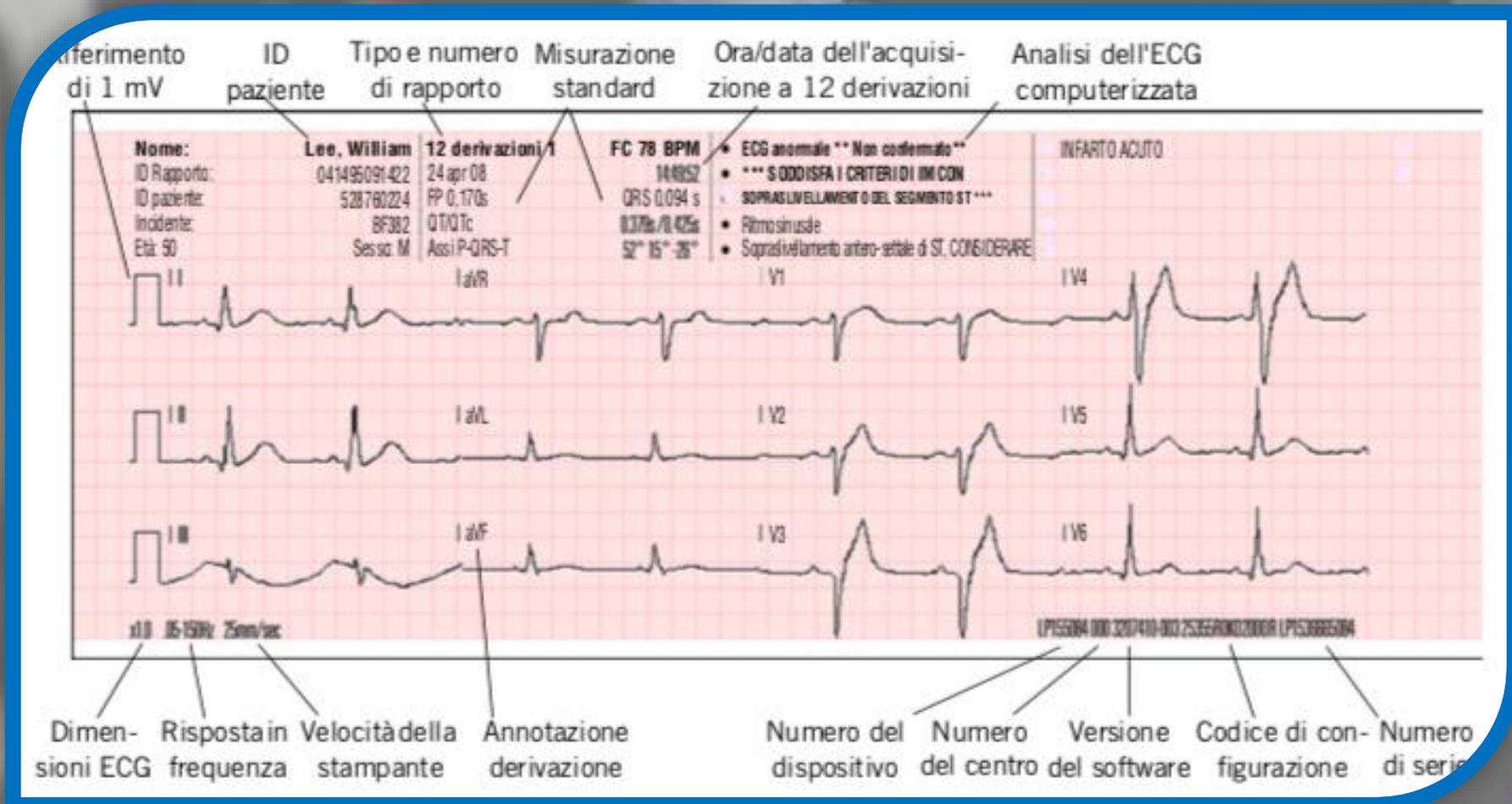

Dimen- Rispostain Velocitàdella Annotazione  
 sioni ECG frequenza stampante derivazione

Numero del Numero Versione Codice di con- Numero  
 dispositivo del centro del software figurazione di serie

**GRAZIE A TUTTI PER  
L'ATTENZIONE**

